

# Guide rapide du module de gestion Ambu®

## Gérer les symboles d'événement

Dans les sections suivantes, vous découvrirez comment télécharger des symboles d'incident sur le mannequin et comment les gérer. Les événements existants peuvent également être renommés ou supprimés s'ils ne sont pas requis.

Avant de télécharger un nouveau symbole, assurez-vous que le fichier image:


- est en format PNG
- a les dimensions 20 x 20 pixels
- n'est pas supérieur à 1 Ko

### 1. Accéder à "Session contrôlée"


Allumez le mannequin et connectez-le à l'ordinateur. Entrez [http:// Ambu.login](http://Ambu.login) ou [192.168.1.1](http://192.168.1.1) dans la barre d'adresse de votre navigateur et sélectionnez "Session contrôlée".



### 2. Gérer les symboles d'événement

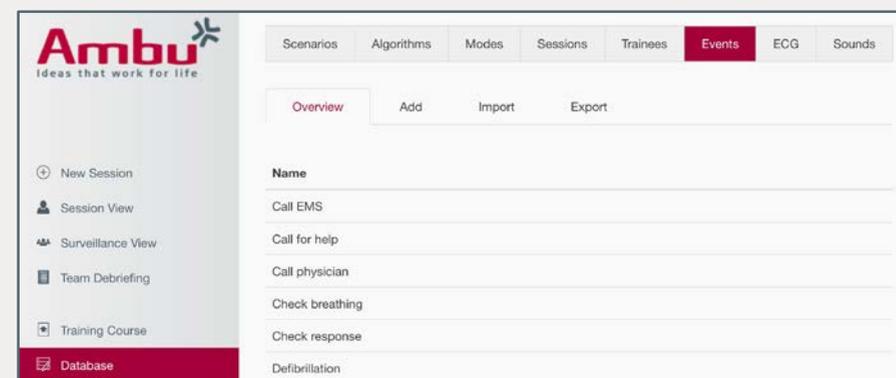


Maintenant, cliquez sur l'onglet "Base de données" et sur la partie "Evènements". Dans l'onglet "Présentation", vous trouverez un aperçu des événements déjà enregistrés sur le mannequin. Si vous cliquez sur l'un de ces événements, vous avez la possibilité de le modifier ou de le supprimer.

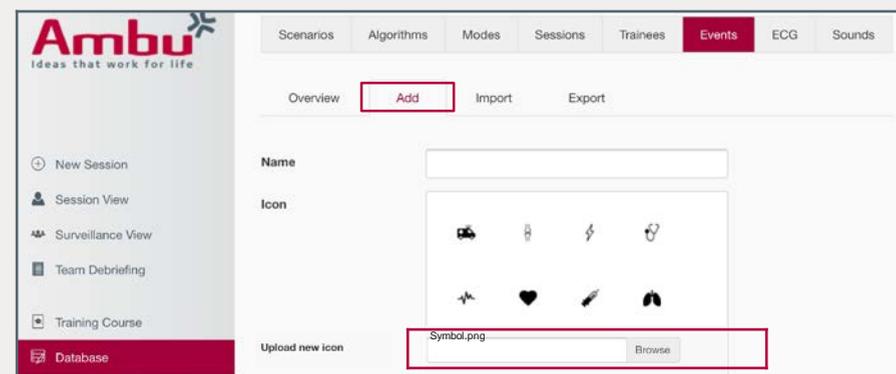

Vous pouvez créer de nouveaux événements et télécharger des symboles sur l'onglet "Ajouter".


## Suite: Gérer les symboles d'événement

Si un message d'erreur apparaît lors du chargement indiquant que le fichier est invalide, assurez-vous que le fichier répond aux exigences susmentionnées (format de fichier, dimensions et taille du fichier). Si nécessaire, répétez l'étape pour télécharger le fichier.

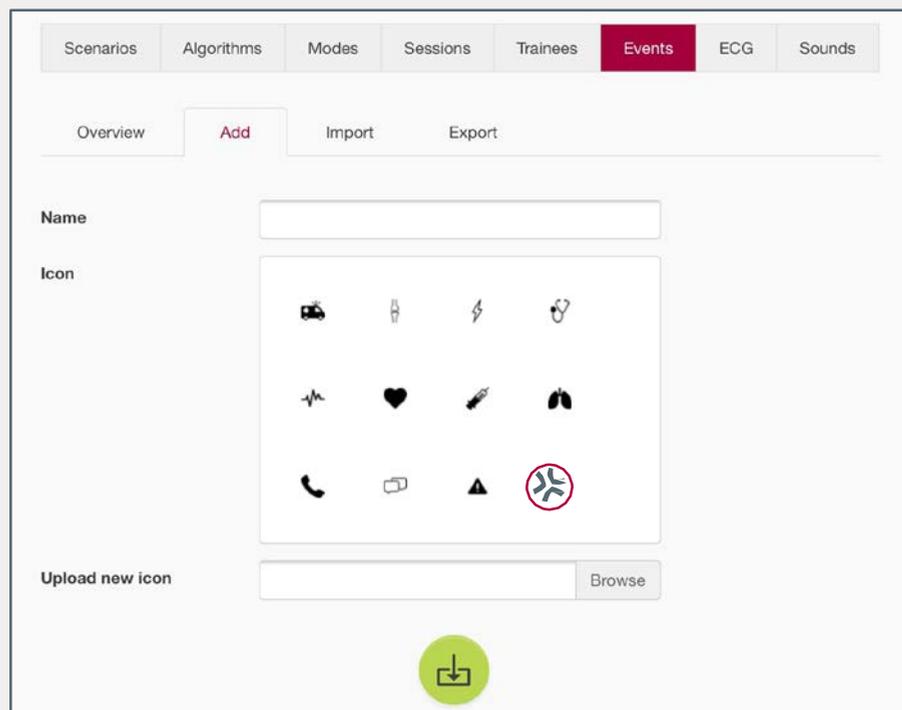

Si le symbole a été téléchargé avec succès, il apparaîtra dans la fenêtre avec les autres symboles. Vous pouvez maintenant utiliser le symbole pour créer un événement. Pour ce faire, entrez le nom du nouvel événement et cliquez sur le symbole souhaité pour le marquer. Enfin, cliquez sur le bouton "Enregistrer"  pour créer l'événement. Les symboles qui ne sont pas nécessaires peuvent être supprimés en appuyant sur le "X" rouge.

## 3. Nouvel événement dans la vue de session

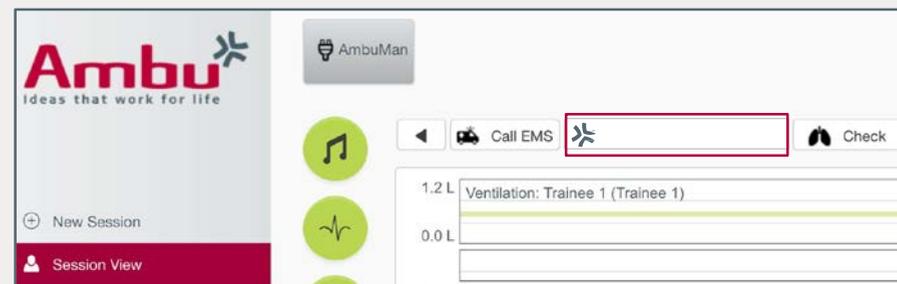

Le nouvel événement sera disponible dans la sélection d'évènement dans l'onglet "Affichage de la session".

### Remarque:

Les événements sont organisés par ordre alphabétique. Pour organiser les événements dans une autre séquence, vous pouvez ajouter un nombre consécutif devant tous les noms d'événements (01, 02, ...) et spécifiez votre propre séquence de cette façon.

Si un nouvel événement est sélectionné lors d'une session, le symbole apparaîtra dans le tableau des performances.