


Guide rapide du module de gestion Ambu®


Fermer une session active

Lors de la livraison du mannequin, une session peut déjà être active, ce qui vous empêchera de commencer une nouvelle session. Dans les sections suivantes, vous découvrirez comment fermer une session active.

1. Connectez le mannequin à l'ordinateur

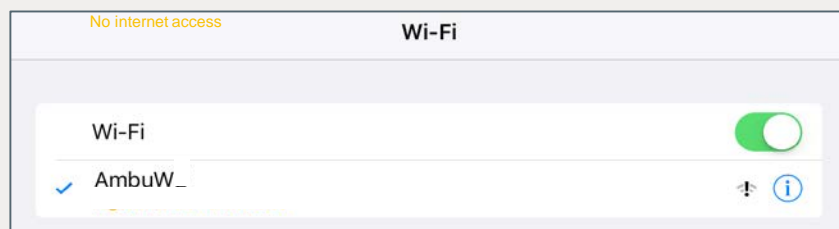

1. Allumez le mannequin en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation situé sur le moniteur de contrôle mécanique. Dès que le voyant LED du bouton d'alimentation est constamment allumé, vous pouvez vous connecter au mannequin via WiFi. Pour ce faire, sélectionnez le réseau sans fil "AmbuW".

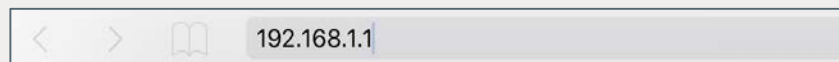


Pour accéder à la configuration, entrez <http://Ambu.login/config> ou 192.168.1.1 dans la barre de recherche du navigateur et confirmez.

2. Fermer une session active


Après avoir accédé à la page, cliquez sur le bouton "Session contrôlée".




Dans l'onglet "Nouvelle session", si la partie "Mannequin" est vide et qu'il est impossible de sélectionner un mannequin, c'est qu'il existe déjà une session active. Il faudra alors fermer cette session pour en démarrer une nouvelle. Cliquez sur l'onglet "Affichage de la session" pour afficher la session active.

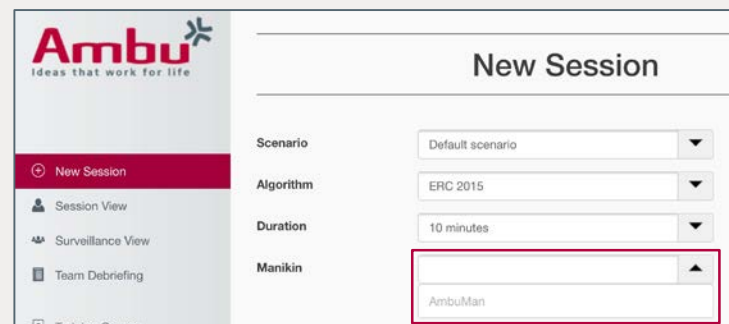

Suite: Fermer une session active

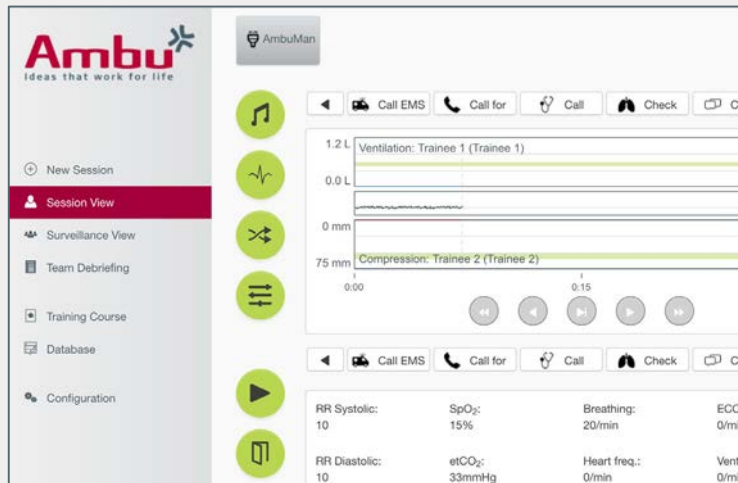




Fermez la session active en cliquant sur le bouton "Quit"  et confirmez avec "OK".




Pour terminer complètement la session, vous devez appuyer sur le bouton .



Vous allez être redirigé vers l'onglet "Débriefing de l'équipe". Ici, vous avez la possibilité de sauvegarder  ou de supprimer  la session.

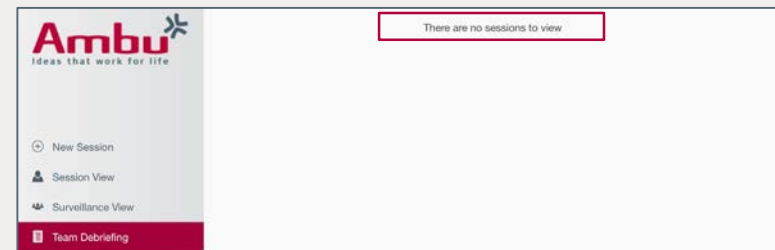

S'il n'y a pas de session active, le message "Aucune session à afficher" apparaît.

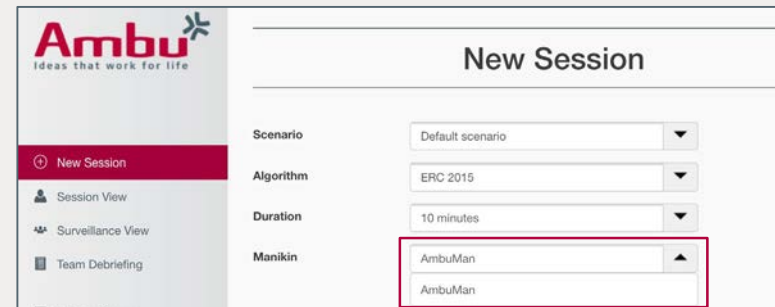

Dans l'onglet "Nouvelle session", le mannequin peut maintenant être sélectionné et une nouvelle session peut être démarrée.