



# Mode d'emploi AmbuMan Wireless


Dans la partie « Réglages » de votre tablette ou PC, puis dans la partie Wi-Fi.

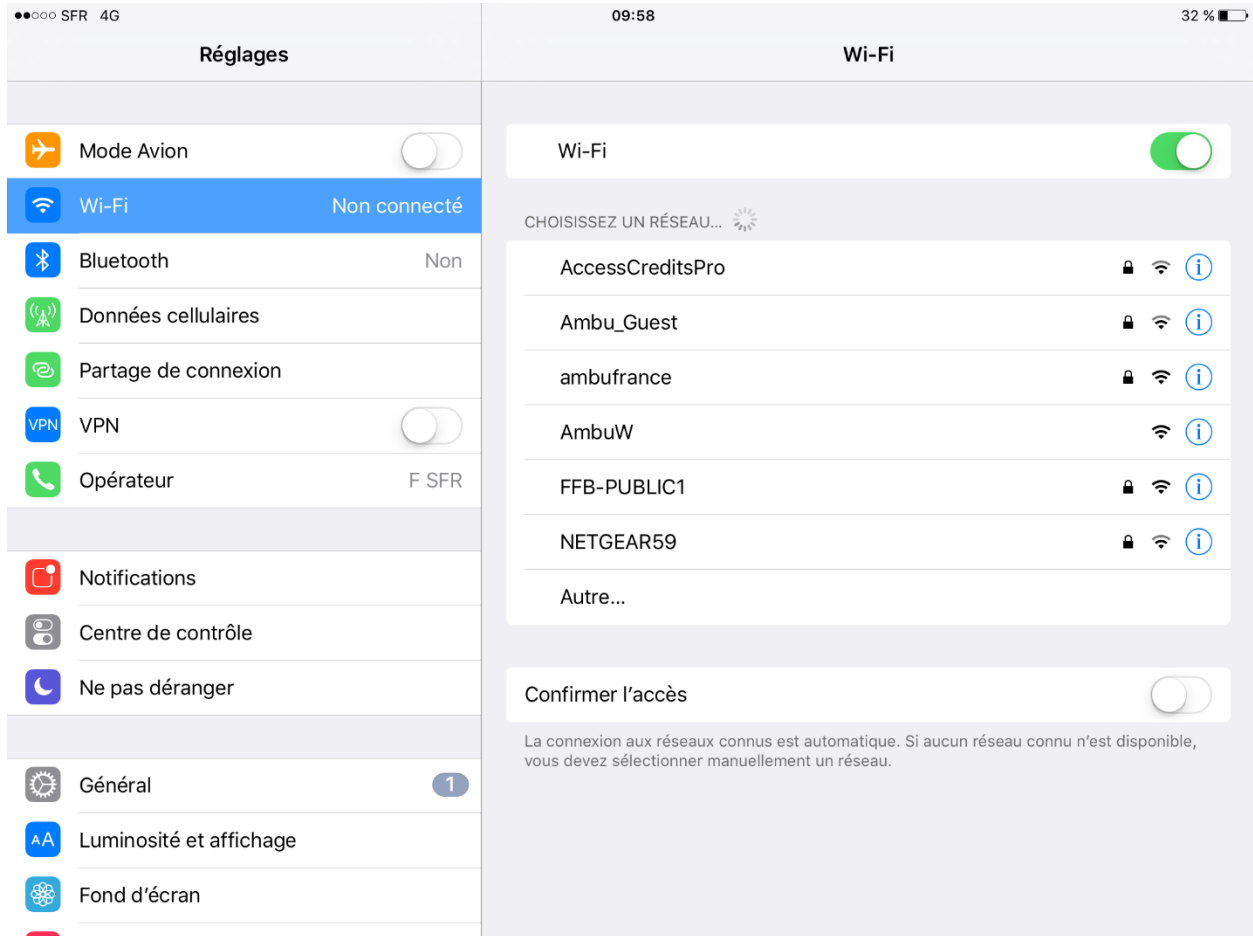


Le nom de réseau du mannequin s'appelle « AmbuW », cliquez dessus pour vous connecter.

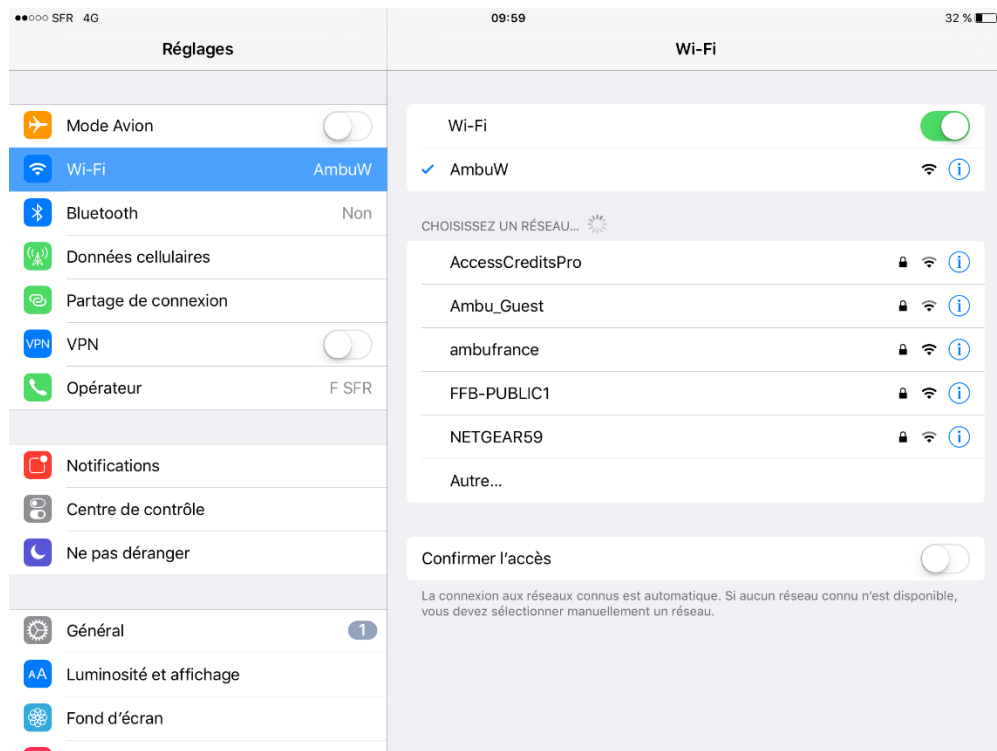


Ouvrir le navigateur Internet.

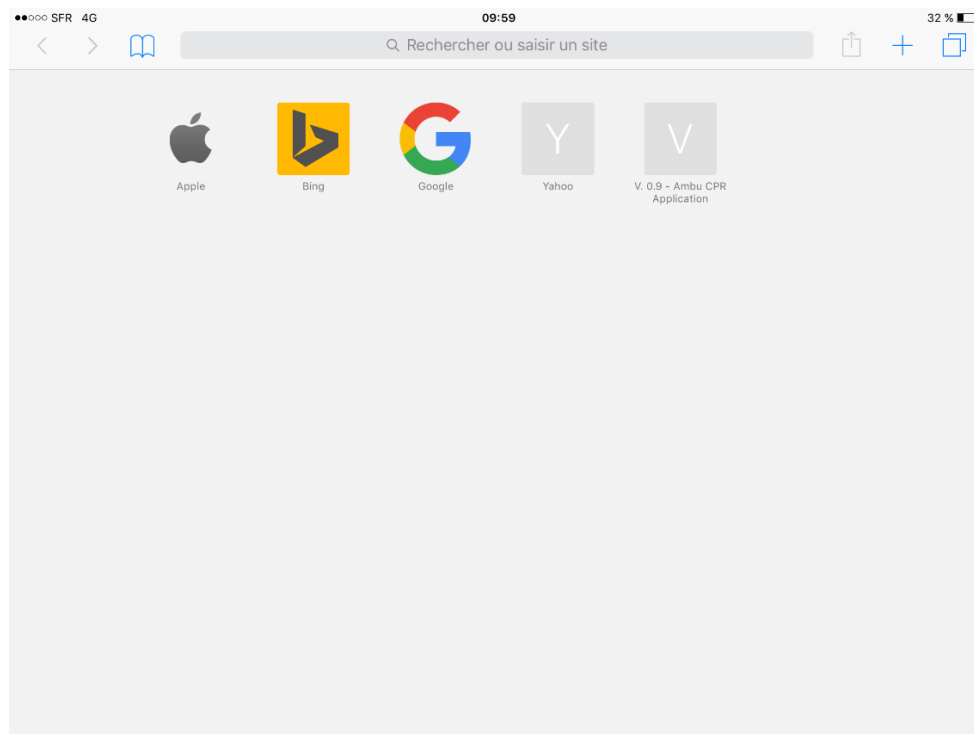

Taper « ambu/login » ou « 192.168.1.1 » pour le navigateur Internet Safari

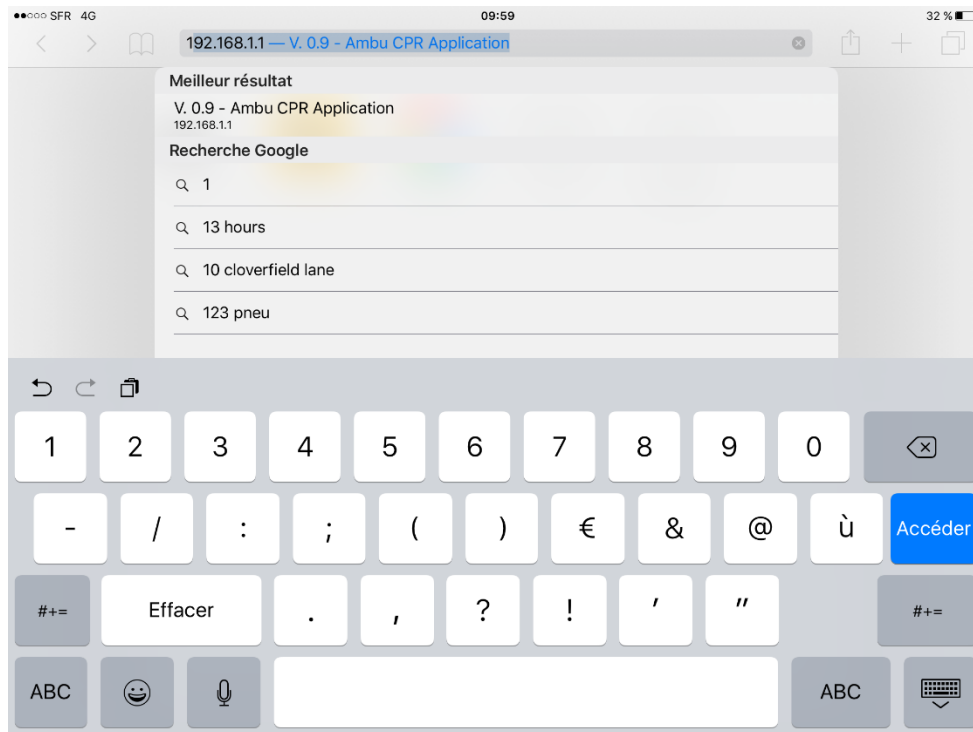

Vous êtes maintenant connecté au mannequin à travers le navigateur Internet. Cliquer sur « Session contrôlée » pour commencer la formation.

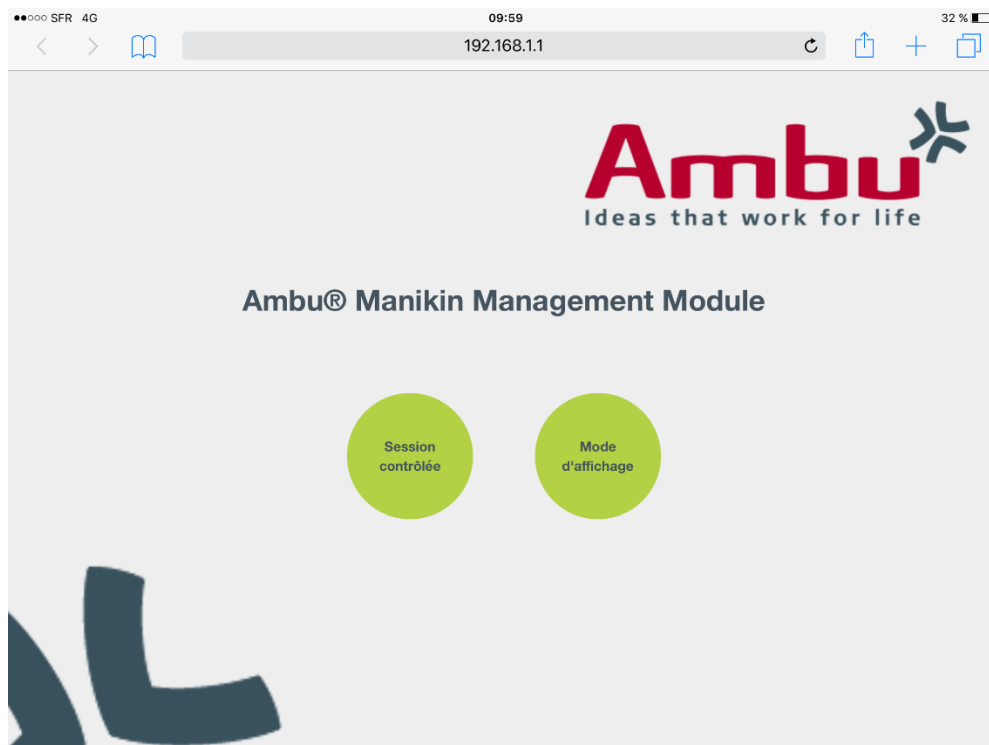

Sur cette interface « Nouvelle session », vous allez pouvoir paramétrer votre session de formation avec les éléments suivants :


- Scénario
- Algorithme
- Durée
- Mannequin
- Instructeur
- Mode d'entraînement
- Apprenti 1
- Apprenti 2

The screenshot shows a mobile browser interface for the Ambu application. The top status bar displays 'SFR 4G', '09:59', and '32%' battery. The browser address bar shows '192.168.1.1'. The main content area is titled 'Nouvelle session' and contains a configuration form with the following fields:


Paramètre	Valeur
Scénario	Ambu 2
Algorithme	AHA 2015
Durée	30 secondes
Mannequin	AmbuMan
Instructeur	Instructor 1
mode d'entraînement	Two person CPR
Apprenti1	Trainee 1
Apprenti2	Trainee 2

At the bottom of the form is a large green circular play button.

Une fois les différents éléments choisis, cliquez sur l'icone « Play » pour lancer la formation.

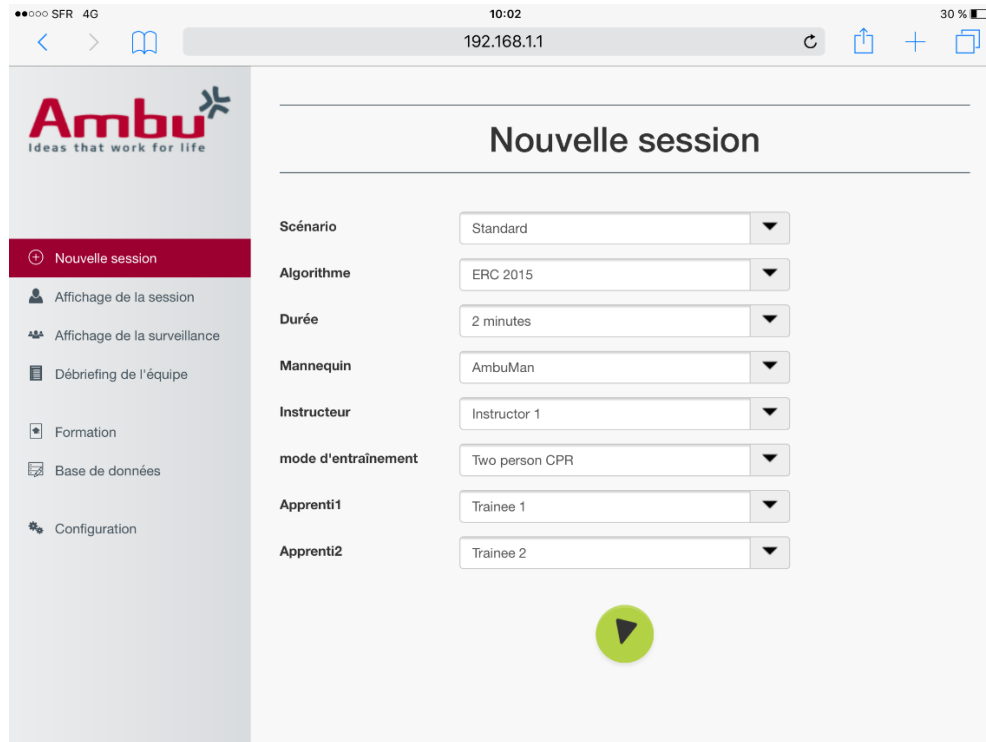


Vous êtes sur l'interface « Affichage de la session ». Pour commencer la formation, cliquer sur l'icone « Play ».

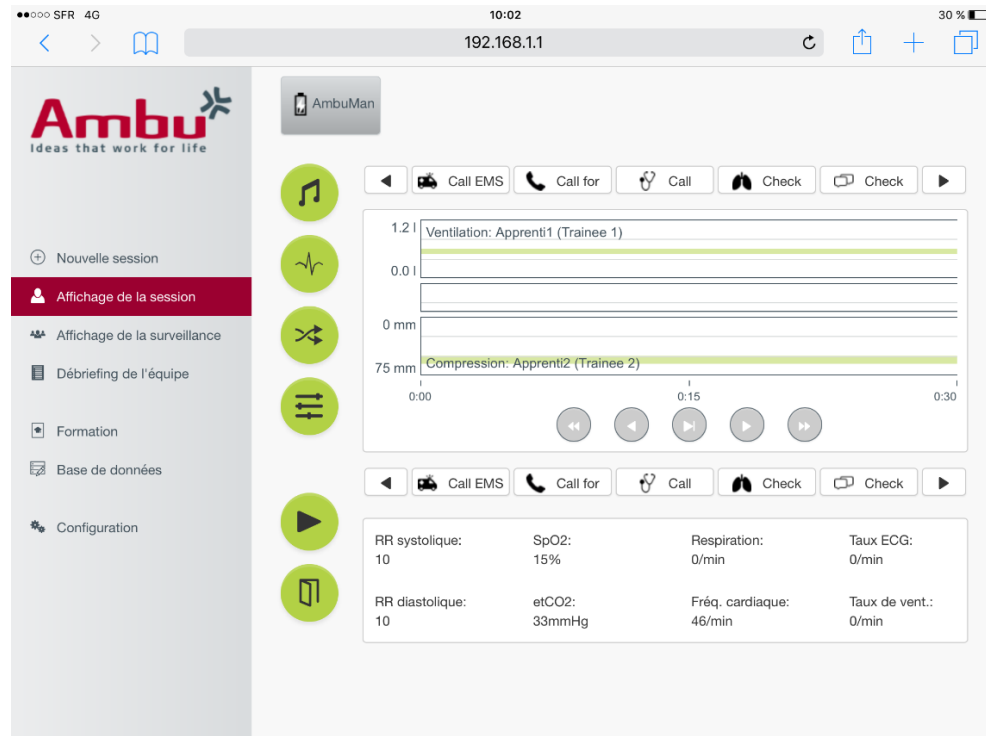


Tout au long de la formation, vous pourrez la faire évoluer avec les éléments suivants :


- Insérer des événements
- Charger effetes sonores
- Modifier les rythmes ECG
- Interchanger les étudiants
- Modifier les paramètres physiologiques

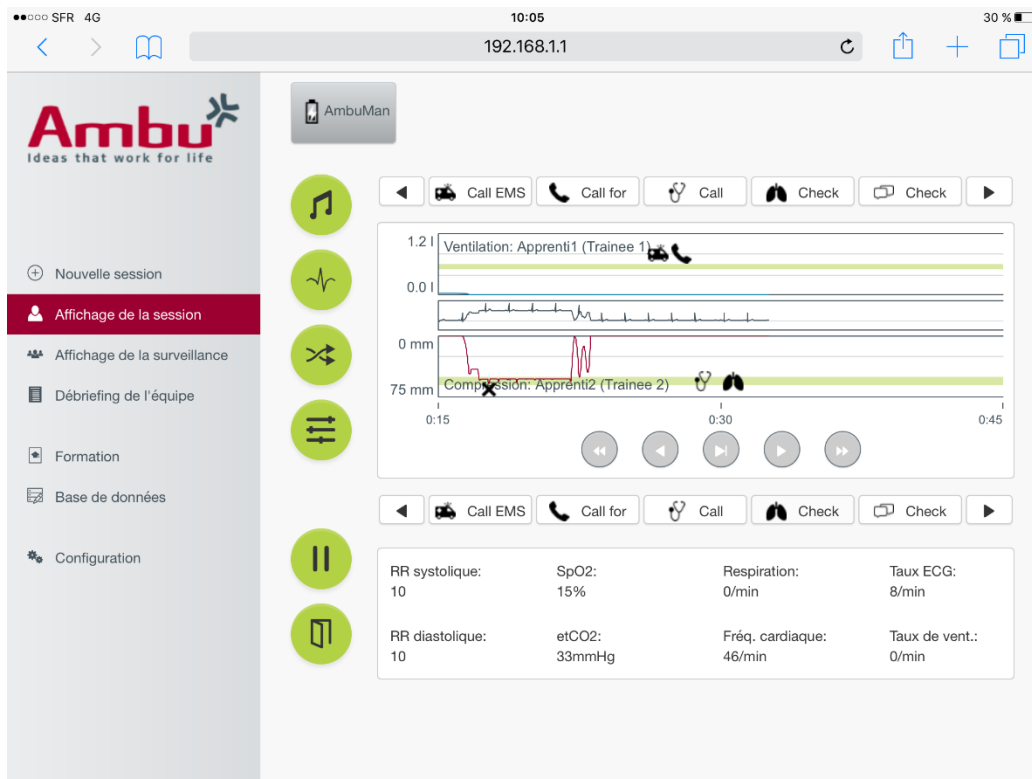

En cliquant sur l'icône « porte », vous quittez la session de formation. Il faudra valider le message d'alerte.

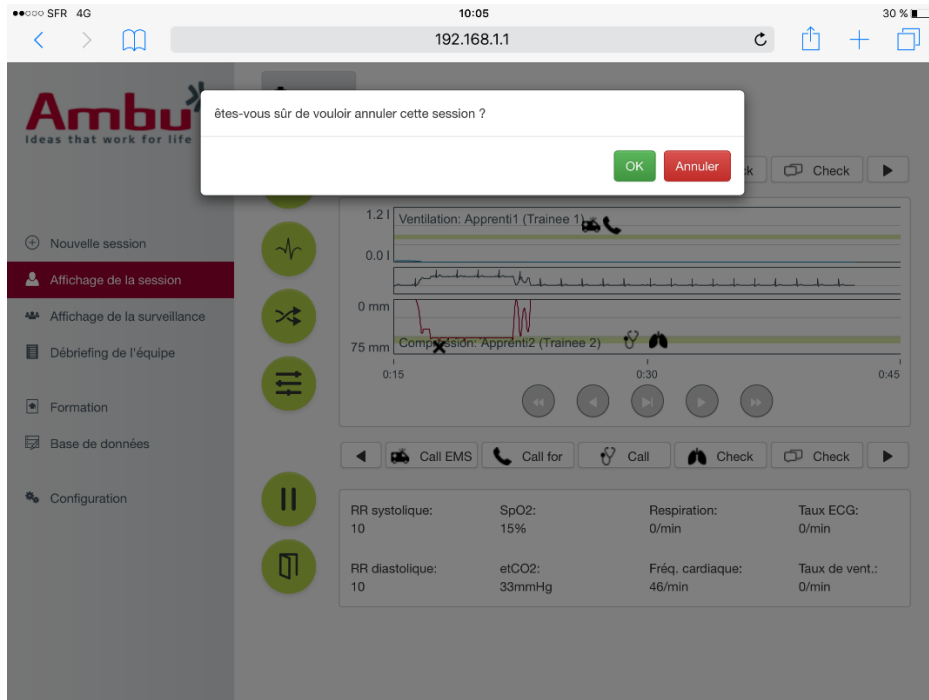

Sur cette interface, vous pouvez faire défiler et visualiser la session de formation sur l'échelle de temps. Cliquez sur l'icône verte pour accéder aux résultats détaillés.

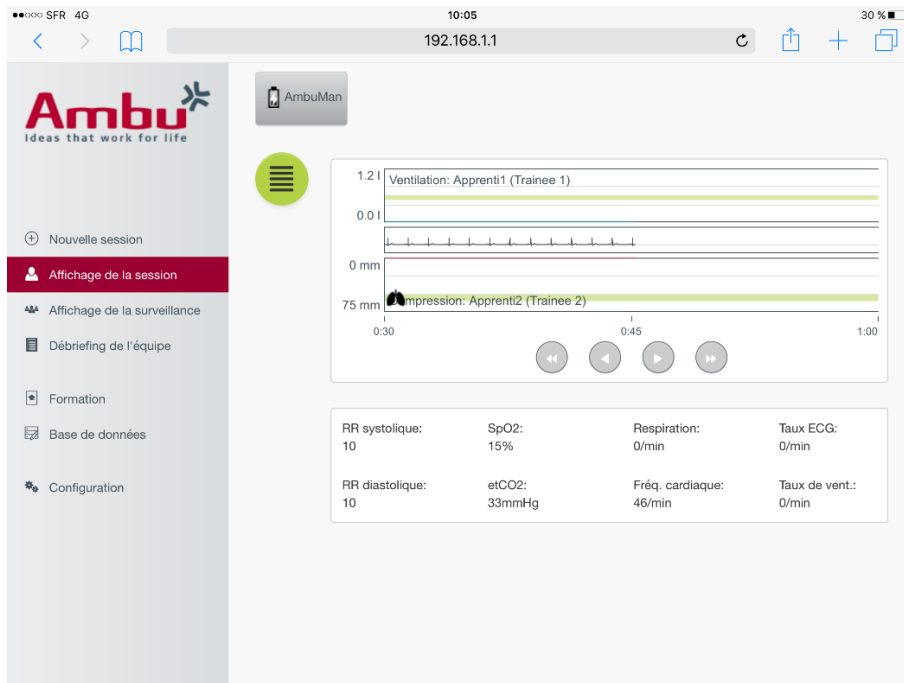






Vous êtes sur l'interface « Débriefing de l'équipe » ; vous trouverez tous les détails de la formation écoulee. Vous pouvez y apporter vos commentaires, valider ou non le parcours des étudiants, mais aussi imprimer, sauvegarder ou supprimer cette session.

The screenshot shows the AmbuMan interface on a mobile device. The top status bar shows 'SFR 4G', '10:05', and '29%' battery. The browser address bar shows '192.168.1.1'. The interface includes a sidebar with navigation options: 'Nouvelle session', 'Affichage de la session', 'Affichage de la surveillance', 'Débriefing de l'équipe' (highlighted), 'Formation', 'Base de données', and 'Configuration'. The main content area is titled 'Résultats d'entraînement' and displays session details: 'Durée: 27.05.2016 à 10:04', 'Mannequin: AmbuMan', 'Apprenti1: Trainee 1', 'Scénario: Standard', 'Instructeur: Instructor 1', 'Apprenti2: Trainee 2', 'Algorithme: ERC 2015', 'Durée: 2:00 minutes', and 'mode d'entraînement: Two person CPR'. Below this is a graph titled 'Ventilation: Apprenti1 (Trainee 1)' with a y-axis from 0.0 to 1.2. The bottom section shows performance metrics for 'Apprenti: Trainee 1' with a 'Résultat: 21/50 42%'. The metrics table is as follows:

Performance	Qualité	Total	Moyenne	Recommandation	Évaluation
Volume de ventilation par minute	●		0.4 l/min	1.5 - 3.6 l/min	trop faible
Volume du débit cardiaque			---		
Taux de ventilation	●		0.3 /min	3 - 6 /min	trop faible
Volume de ventilation	●	1	742 ml	500 - 600 ml	trop élevé
infalction stomacale	●	0		0	1 OK
Rythme ECG			---		
Profondeur de la compression			---		
Pause entre cycles de compression			---		
Relation de compression /relaxation			---		
Mauvais position des mains			---		
Penchement			---		
Relation compression/ventilation	●		2/1	30/2	
Temps de transfert			---		
Délai jusqu' à la défibrillation			---		

Below the table, the results for 'Apprenti: Trainee 2' are shown: 'Résultat: 31/50 62%'. The table headers for Trainee 2 are also visible.



Pause entre cycles de compression		2	8.8 sec	0 - 9 sec
Relation de compression /relaxation			45/55	50/50
Mauvais position des mains		1		3 OK
Penchement		1		3 OK
Relation compression/ventilation			2/1	30/2
Temps de transfert			0,6 min	
Délai jusqu' à la défibrillation			- - -	

**Trainee 1**

0:26 Call EMS  
0:27 Call for help

**Trainee 2**

0:28 Call physician  
0:30 Check breathing

**Commentaire**

**approuvé passé**

Trainee 1  Trainee 2

**approuvé par**



Vous êtes sur l'interface « Formation » ; ici, vous pouvez créer et préparer vos sessions de formation par avance en indiquant le nom des participants. Il y a aussi la possibilité d'importer et d'exporter ces données.

The screenshot shows the Ambu mobile application interface. At the top, the status bar displays 'SFR 4G', the time '10:06', and '29%' battery. The browser address bar shows '192.168.1.1'. The Ambu logo 'Ambu Ideas that work for life' is in the top left. A navigation menu on the left includes: 'Nouvelle session', 'Affichage de la session', 'Affichage de la surveillance', 'Débriefing de l'équipe', 'Formation' (highlighted in red), 'Base de données', and 'Configuration'. The main content area has tabs: 'Présentation', 'Ajouter' (highlighted in red), 'Importer', and 'Exporter'. Below the tabs are form fields for: 'Date' (2016-05-27), 'Durée' (10 : 05), 'Scénario' (Ambu 2), 'Algorithme' (AHA 2015), 'Durée' (30 secondes), 'mode d'entraînement' (Two person CPR), and 'Instructeur' (Instructor 1). At the bottom, there is a table with columns: 'Nr', 'Apprenti1', 'Apprenti2', 'Mannequin', 'Aller à', and 'Supprimer'. Below the table are two large green circular buttons: one with a plus sign (+) and one with a download icon.

Vous êtes sur l'interface « Base de données » ; ici, vous pouvez créer et ajouter tous les éléments qui paramètreront vos sessions de formation. Pour chaque élément, il y a aussi la possibilité d'importer et d'exporter ces données.

The screenshot shows a mobile browser interface for the Ambu application. At the top, the status bar displays 'SFR 4G', '10:06', and '29%' battery. The browser address bar shows '192.168.1.1'. The application header features the Ambu logo and the tagline 'Ideas that work for life'. A horizontal navigation bar contains tabs: 'Scénarios' (selected), 'Algorithmes', 'Modes', 'Sessions', 'Personnes', 'événements', 'ECG', and 'Fichiers'. Below this, a sub-navigation bar includes 'Présentation' (selected), 'Ajouter', 'Importer', and 'Exporter'. The main content area is titled 'Nom' and contains a list of scenario names: 'Ambu 2', 'Default scenario', 'Example scenario', and 'Standard'. The left sidebar contains the following menu items: 'Nouvelle session', 'Affichage de la session', 'Affichage de la surveillance', 'Débriefing de l'équipe', 'Formation', 'Base de données' (highlighted in red), and 'Configuration'.

Vous êtes sur l'interface « Configuration » ; ici, vous pouvez modifier tous les éléments visuels qui apparaîtront dans vos sessions de formation.

●●○○ SFR 4G 10:06 29 %

192.168.1.1

**Ambu**  
Ideas that work for life

+

- Nouvelle session
- Affichage de la session
- Affichage de la surveillance
- Débriefing de l'équipe
- Formation
- Base de données

**Configuration**

écran Mode d'affichage Débriefing Imprimer Stockage

**Affichage du graphique**  Ligne  Barre  Bulle

**échelle chronologique**  30 sec  1 min  2 min  5 min  
 10 min

**Signaux ECG**  Activer  Inactiver

**événements**  Activer  Inactiver

**Physiologie**  Activer  Inactiver

**ID des événements**  Activer  Inactiver

Download icon